

flexeal

Anziehen


1. *Flexeal* Streifen aus der Verpackung nehmen und die Schutzfolie an der Seite abziehen. Am besten von der Seite mit dem Überstand der Schutzfolie.



2. Mund-Nasen-Maske mit der Außenseite nach oben legen. Der transparente Streifen auf der Mund-Nasen-Maske befindet sich an der oberen Kante der Außenseite der Maske.



3. Den *flexeal* Streifen leicht mit der Hand auf der Trägerfolie der Mund-Nasen-Maske andrücken. Der *flexeal* Streifen steht ca. 1 cm über den Rand der Mund-Nasen-Maske.

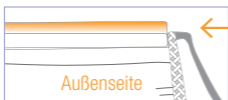


4. Die Mund-Nasen-Maske von der Nase ausgehend nach links und rechts andrücken. Erst wenn die Mund-Nasen-Maske fest anliegt, die Gummischlaufen an den Ohren befestigen.



Zum Abnehmen der Maske

den *flexeal* Streifen von der Seite zur Nase hin abziehen. Wird die Mund-Nasen-Maske nicht getragen, befindet sich auf der Innenseite eine Trägerfolie zum Schutz des *flexeal* Streifens. Den *flexeal* Streifen einfach um die obere Kante zur Innenseite der Mund-Nasen-Maske drücken.

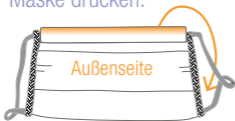

Die Vorgehensweise bei der Verwendung mit einer eigenen Mund-Nasen-Maske ist die gleiche wie oben. Der *flexeal* Streifen haftet auch auf herkömmlichen Mund-Nasen-Masken, die keinen speziellen transparenten Streifen aufweisen. In diesem Fall drücken Sie die Trägerfolie wieder auf den *flexeal* Streifen, wenn die Mund-Nasen-Maske nicht getragen wird. Der *flexeal* Streifen muss nicht von der Mund-Nasen-Maske abgezogen werden.

Reinigung

Den *flexeal* Streifen von der Seite aus von der Maske lösen. Die klebrige Seite des *flexeal* Streifens unter fließendem Wasser mit Spülmittel abwaschen und an der Luft trocknen lassen. Für eine optimale Reinigung kann der *flexeal* Streifen auch mit herkömmlichem Desinfektionsmittel gereinigt werden. Anschließend kann der *flexeal* Streifen wieder wie beschrieben auf die Maske aufgebracht werden. Die Mund-Nasen-Maske kann bei 60°C gewaschen werden.